


ROBER

roberlimited.com

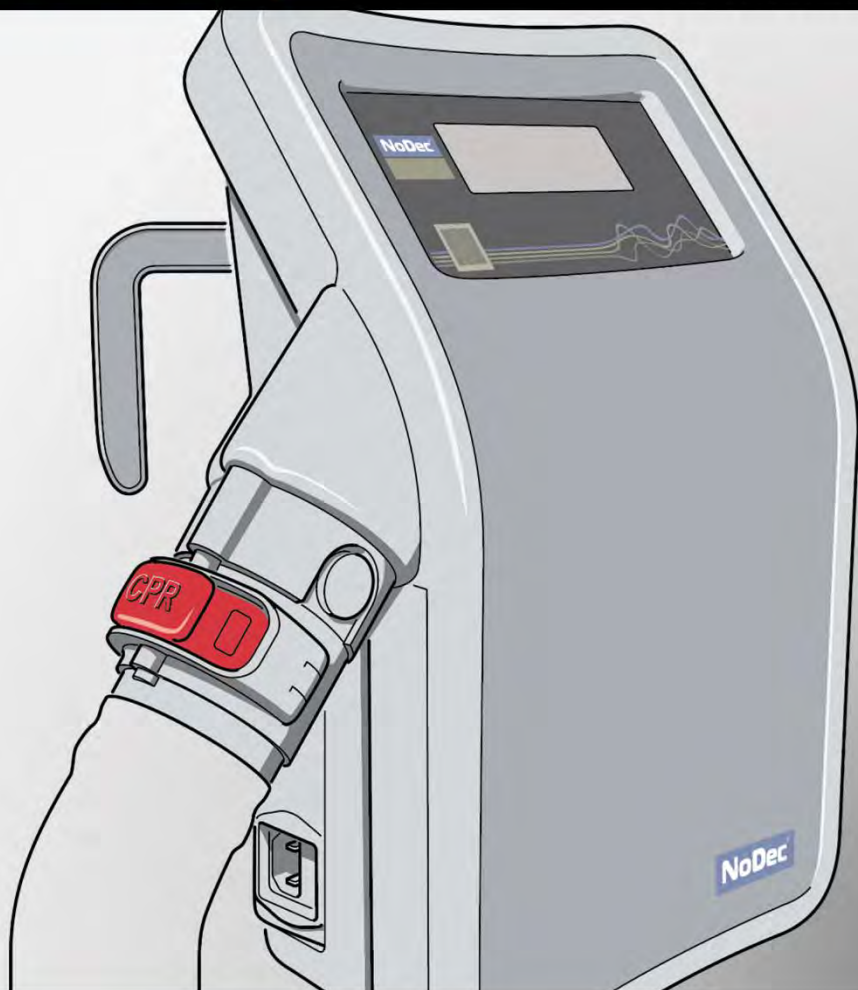

NoDec[®]

BARI

(FOAM COMBO)

MODE D'EMPLOI





NoDec[®]

BARI

MANUEL DE L'UTILISATEUR

MODE D'EMPLOI

Version 5.0

Sep 2025

Historique des versions

Version	Réalisée par	Date de révision	Approuvée par	Date d'approbation	Motif
1.0	Ben Smith	S.O.	M. Hutson	Mai 2016	Version originale
2.0	Ben Smith	Mai 2018	M. Hutson	Mai 2018	Mise à jour des graphiques
2.1	Ben Smith	Oct. 2018	M. Hutson	Oct. 2018	Mise à jour des matelas spécifiques aux clients
2.2	Mike Hutson	Mai 2021	M. Hutson	Mai 2021	Ajout d'un représentant CE et UE
3.0	Richard Smith	Juill. 2023	M. Hutson	Août 2023	Ajout des sections Utilisation prévue et Déclaration d'incident, mise à jour de l'étiquetage
4.0	R. Smith	Août. 2024	M. Hutson	Août 2024	Mise à jour des instructions d'utilisation du crochet de lit
5.0	R.Smith	Sep 2025	M Hutson	Sep 2025	UKCA Mark Added

Sommaire

Introduction	7
Déclaration d'incident	7
Utilisation prévue	8
Informations complémentaires	9
<i>Contre-indications</i>	11
Description des symboles	11
Liste des composants	12
Mises en garde et avertissements d'ordre général	14
Installation	16
Écrans d'affichage / Modes de fonctionnement	21
Mise en marche	21
Chargement	22
Mode alterné automatique	23
Déverrouillage	23
<i>Déverrouillage de l'écran</i>	24
Réglages utilisateur	25
<i>Mode alterné</i>	26
<i>Mode statique</i>	28
Modification des réglages de pression	29
Mode gonflage maximum	30
Structure du matelas	30
Fonction de descente du patient	32
Alarmes	33
Alarme de pression élevée	34
Alarme de pression basse	34
Alarme de panne de courant	35
RCP d'urgence	36

Mode de transport	37
Préparation	37
Stockage (et expédition)	37
Options d'écran supplémentaires	38
Écran du menu des options	38
Luminosité de l'écran	39
Mode silencieux	39
Modification de la langue	40
Nettoyage et entretien	41
Procédures de nettoyage	41
Nettoyage du matelas	41
Nettoyage de la pompe	43
Entretien	43
Paramètres techniques	44
Pompe	44
Matelas	44

Introduction

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition du matelas à air à cycles de pression alternée à trois cellules NoDec® BARI. Ce dispositif médical de haute qualité, s'il est installé et entretenu conformément aux instructions suivantes, fonctionnera parfaitement pendant de nombreuses années et offrira des performances cliniques inégalées.

Le NoDec® BARI est un système de remplacement de matelas à pression alternée conçu pour prévenir et traiter les escarres. Il est destiné aux patients à risque élevé et aux escarres de stade V.

Ce système de matelas est fabriqué conformément aux normes internationales EN 60601-1 et EN 60601-1-2, et porte le marquage CE & UKCA.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le NoDec® BARI.

Déclaration d'incident

Tout incident grave en lien avec ce dispositif doit être signalé au fabricant (Rober Ltd) et à l'autorité compétente de l'état membre dans lequel vous vous trouvez.

Utilisation prévue

Le NoDec® BARI est un système de remplacement de matelas à cycles de pression alternée à trois cellules conçu pour prévenir et traiter les escarres. Il est destiné aux patients à risque élevé et aux escarres de stade V.

Le NoDec® BARI a été développé pour éliminer la pression de contact exercée sur le patient lorsque ce dernier est allongé sur le matelas. Pour ce faire, la pompe gonfle et dégonfle de manière séquentielle les cellules pneumatiques du matelas. Ce système permet d'éliminer périodiquement la pression de contact et de rétablir ainsi la circulation sanguine et l'oxygénation des tissus profonds autour des protubérances osseuses vulnérables.

Ce matelas peut être installé sur n'importe quel type de lit dans les hôpitaux, les maisons de retraite et chez les particuliers. Ce dispositif de remplacement de matelas est silencieux et confortable et peut être installé par une seule personne. Un écran tactile permet à l'opérateur de contrôler facilement le système.

Le système se compose d'un matelas rempli d'air placé sur un cadre de lit conventionnel et relié par un tuyau d'alimentation en air à une pompe électrique indépendante contrôlée par microprocesseur.

La pompe est dotée d'un logiciel qui utilise un capteur de pression à semi-conducteur permettant de surveiller en permanence la pression d'air dans le matelas. Le dispositif se régule de manière autonome et maintient automatiquement la pression d'air au niveau adéquat en fonction du poids du patient et de sa position dans le lit.

Une valve de dégonflage d'urgence est prévue en cas de réanimation cardiaque. Véritable unité de RCP, le matelas possède également des valves étanches qui lui permettent de rester gonflé jusqu'à 12 heures en cas de déconnexion du système.

Plusieurs alarmes visuelles et sonores préviennent les soignants en cas de problème.

N.B. Comme tous les matelas à pression alternée, le NoDec® BARI est contre-indiqué chez les patients présentant des fractures instables ou des lésions du rachis.

Informations complémentaires

Le NoDec® BARI remplace les matelas de n'importe quel cadre de lit médicalisé. Ce dispositif de remplacement de matelas est silencieux et confortable et peut être installé par une seule personne.

Il a été démontré que l'élimination fréquente de la pression de contact (interface) réduisait le risque d'escarres provoquées par la réduction du flux sanguin capillaire dans les tissus entourant les protubérances osseuses. Le **NoDec® BARI** est également une aide précieuse dans le traitement des escarres existantes jusqu'au stade V.

Le NoDec® BARI a été développé pour éliminer la pression de contact exercée sur le patient lorsque ce dernier est allongé sur le matelas. Pour ce faire, la pompe gonfle et dégonfle de manière séquentielle les cellules pneumatiques du matelas. Ce procédé permet de réduire périodiquement la pression de contact et de

rétablir ainsi la circulation sanguine et l'oxygénation des tissus profonds autour des protubérances osseuses vulnérables.

Ce système se compose d'un matelas rempli d'air placé sur un cadre de lit conventionnel et relié par un tuyau d'alimentation en air (ombilical) à une pompe à commande indépendante. Ce matelas est constitué de cellules individuelles, protégées par une housse Gerroderm.

La pompe est contrôlée par un logiciel qui permet de maintenir la pression d'air dans les cellules au niveau requis et de modifier automatiquement la pression d'air en fonction du poids du patient et de sa position dans le lit. La pression d'air peut également être modifiée en fonction des soins.

La présence supplémentaire d'une valve RCP, sur le côté de la pompe, permet de dégonfler rapidement le matelas en cas d'urgence.

Contre-indications

Comme tous les matelas à pression alternée, le NoDec® BARI est contre-indiqué chez les patients présentant des fractures instables ou des lésions du rachis.

Description des symboles

Le mode d'emploi du NoDec® BARI et la pompe comportent de nombreux symboles :

Explication des symboles



Partie appliquée de type B



Dispositif médical de classe II (certifié conforme à la classe I)

I / O

Marche/Arrêt



Consultez le mode d'emploi



Avertissement général

Liste des composants

Déballiez votre système de matelas NoDec® BARI et vérifiez que les éléments suivants sont présents :

- Pompe NoDec® BARI :

Notez le nom, le modèle et le numéro de série de votre pompe au cas où vous auriez besoin de les mentionner lorsque vous contactez Rober ou votre distributeur local.

Coordonnées
du fabricant


Numéro
de série

Coordonnées
du distributeur


Nom du
modèle

Référence
catalogue

IUD

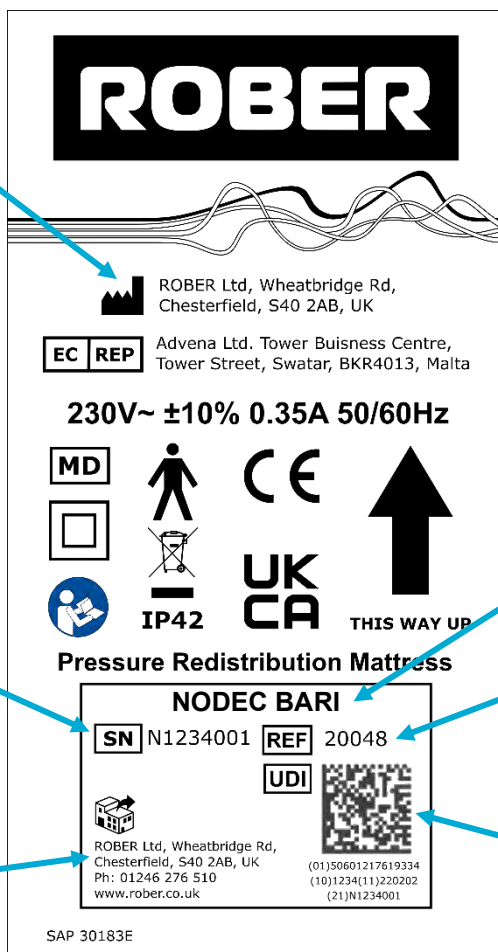

- Matelas NoDec® BARI :

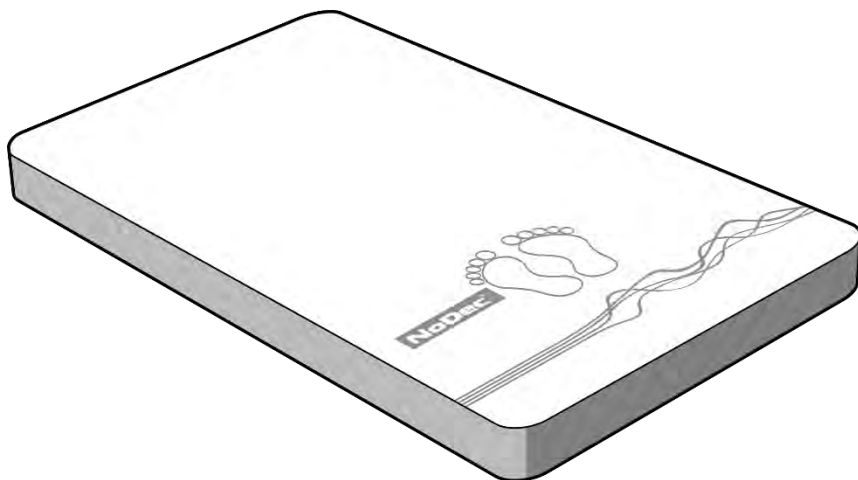

La housse supérieure est fabriquée en Dartex™, un tissu antimicrobien, multi-extensible, perméable à la vapeur et enduit de polyuréthane. La housse inférieure est en nylon durable enduit de PVC.

- Cordon d'alimentation :

La fiche d'alimentation doit être adaptée à votre pays ou région.

Mises en garde et avertissements d'ordre général



Avant d'installer le matelas, il est important de lire toutes les consignes de sécurité suivantes. Toute action ou opération ne respectant pas les consignes de ce mode d'emploi est effectuée aux risques et périls de l'utilisateur. Rober et/ou le fournisseur ne peuvent être tenus responsables de

- Vérifiez le dispositif médical avant de l'utiliser. En cas de défauts, le matelas ne doit pas être utilisé et le fournisseur doit en être immédiatement informé.
- Vérifiez que le cordon d'alimentation est placé de manière à éviter tout risque d'obstruction ou de blessure.
- **Risque d'explosion :**
N'utilisez pas le dispositif en présence de produits chimiques ou de gaz inflammables.
- **Risque d'incendie :**
Ne placez pas le dispositif à proximité de sources de chaleur ou de flammes nues.
- **Risque d'électrocution :**
Assurez-vous que l'alimentation secteur est reliée à la terre.
N'immergez jamais partiellement ou totalement l'équipement électrique dans des liquides.
Vérifiez que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé.
Ne manipulez jamais la fiche avec les mains mouillées.
N'ouvrez pas le boîtier. Toute réparation doit être effectuée par un technicien qualifié.


Ne renversez pas d'aliments ou de liquides sur la pompe. *En cas de déversement, débranchez le dispositif du secteur et laissez-le sécher avant de le réutiliser.*

- N'utilisez pas de solutions de nettoyage à base de phénol sur le matelas ou la housse.
- Ne placez aucun composant du dispositif médical dans un autoclave chauffant ou à vapeur.
- **Risque d'étouffement :**
La housse n'est pas perméable à l'air. Assurez-vous que le patient peut utiliser le produit en toute sécurité.
- Ne faites pas tomber la pompe et ne laissez pas tomber d'objets dessus.
- N'utilisez jamais d'objets pointus sur ou à proximité du matelas.
- N'introduisez jamais d'objets dans la pompe.


Installation

Veuillez suivre ces instructions pour installer correctement votre matelas de remplacement NoDec® BARI en toute sécurité.



1. Posez le matelas sur le cadre de lit, en veillant à ce que la housse supérieure gris clair soit orientée vers le haut et que le tuyau d'alimentation en air (ombilical) soit placé au pied du lit.

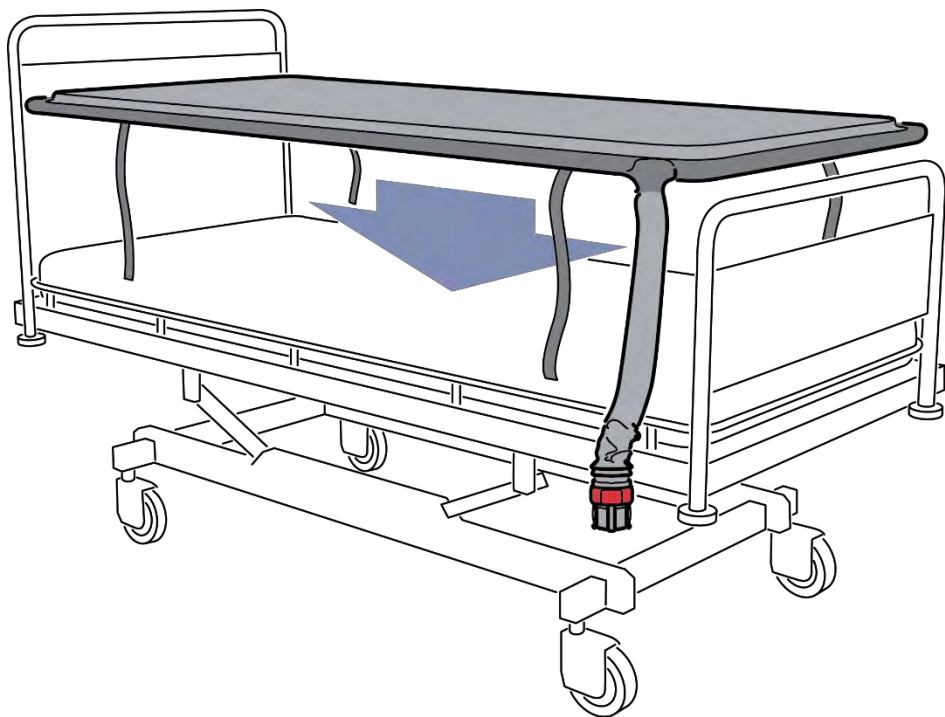


2. Fixez le matelas au lit à l'aide des sangles et des attaches fournies.

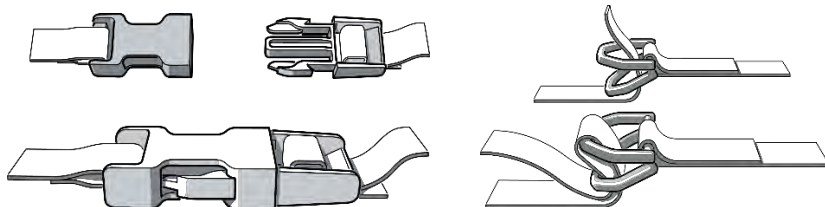


Assurez-vous que les sangles n'entravent pas le fonctionnement des éléments mobiles du lit médicalisé. Si les sangles sont attachées à la fois aux éléments mobiles et aux éléments fixes du cadre de lit, elles endommageront gravement le matelas. Après avoir installé le matelas, testez soigneusement les fonctions du lit pour vous assurer que le matelas bouge librement avec le sommier.

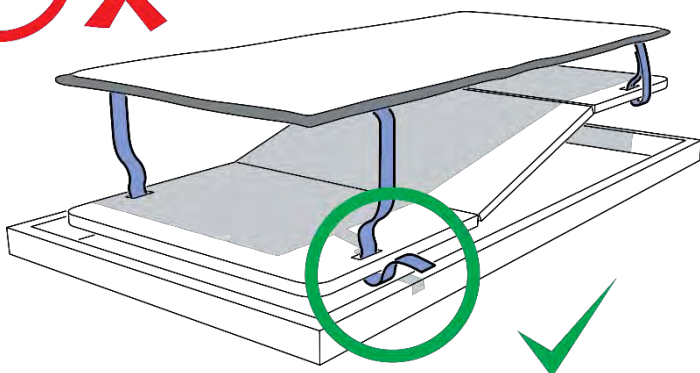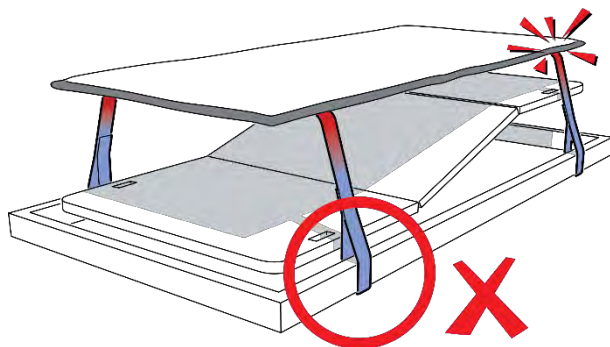


3. Les crochets à l'arrière du NoDec® BARI ont été conçus pour s'adapter à une variété de cadres de lit et peuvent être ajustés facilement en ouvrant les crochets et en les faisant pivoter. Une fois ouverts, ils se fixent au cadre du lit sous la pression d'un ressort.

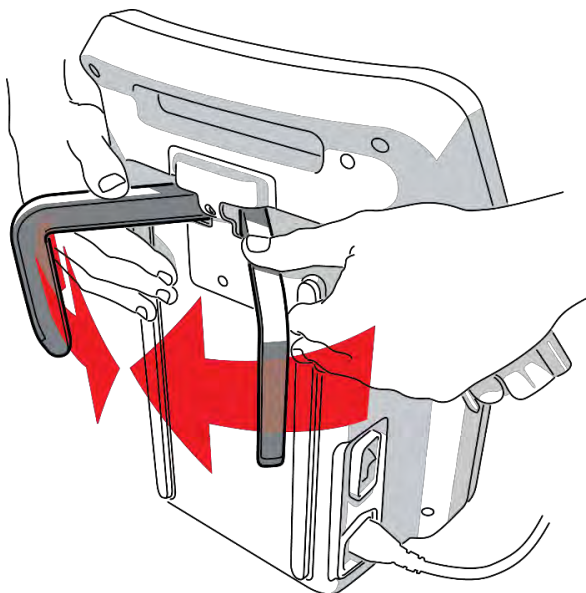


4. Accrochez la pompe au pied du lit, sur le cadre, en orientant le panneau de commande vers l'extérieur.

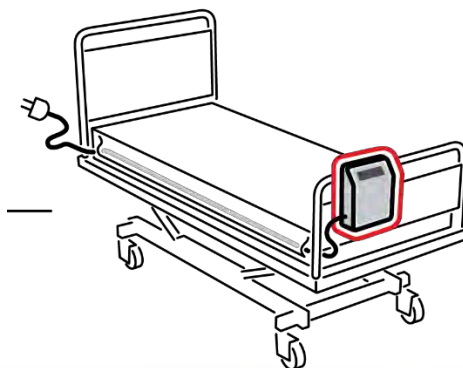

5. Vérifiez que le clip de RCP est en position fermée et branchez le tuyau d'alimentation en air sur la pompe.

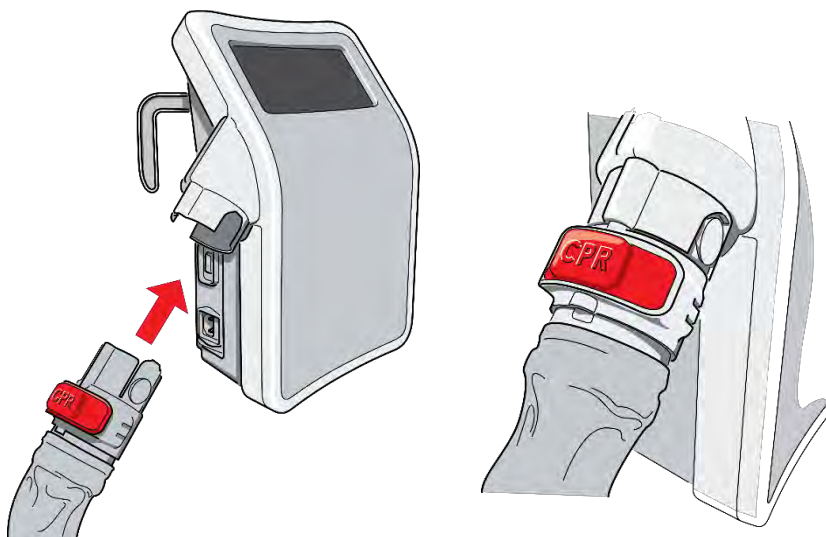

6. Branchez le câble d'alimentation sur la pompe à l'aide du connecteur international, puis branchez l'autre extrémité (le *dispositif de déconnexion principal*) sur une prise de courant **facilement accessible**. Allumez la pompe à l'aide de l'interrupteur situé à droite de la prise de courant internationale de l'appareil.

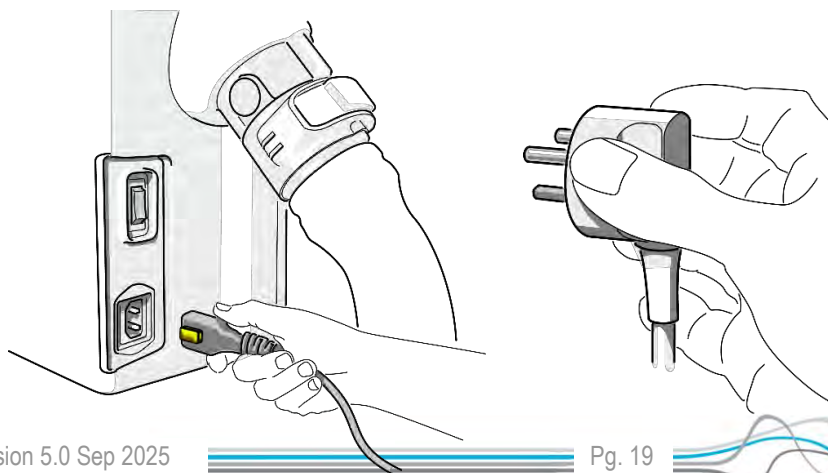




En raison de la conception particulière du câble d'alimentation, vous devez impérativement appuyer sur le bouton jaune pour le débrancher. Assurez-vous que la pompe est placée de manière à ce que ce bouton soit accessible.



Assurez-vous que le câble d'alimentation passe correctement dans les boucles situées sous la jupe (goulotte). Cela permet de réduire les risques liés au câble d'alimentation.

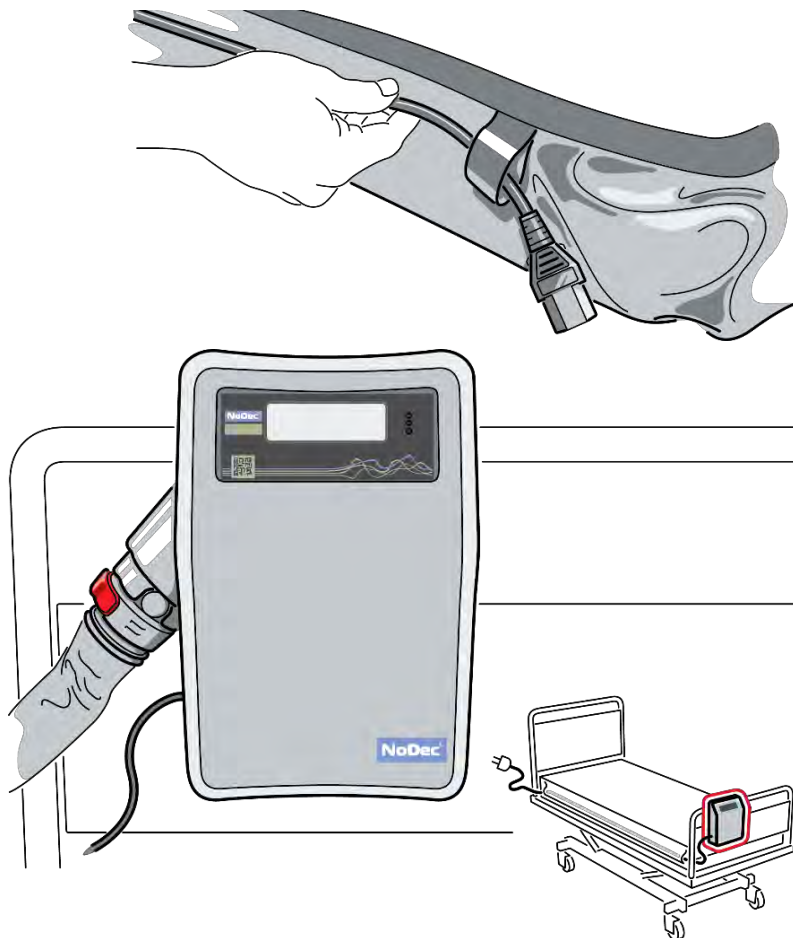


7. Attendez environ 30 minutes, le **système de remplacement de matelas NoDec® BARI** est alors prêt à être utilisé.

Écrans d'affichage / Modes de fonctionnement

Avant d'utiliser le NoDec® BARI, il est important de comprendre le fonctionnement de l'écran tactile situé sur le panneau avant de la pompe et de savoir naviguer dans les différents modes de fonctionnement du système.



Mise en marche

Dès que l'unité de contrôle est allumée, l'écran s'allume et la fenêtre d'attente NoDec s'affiche.

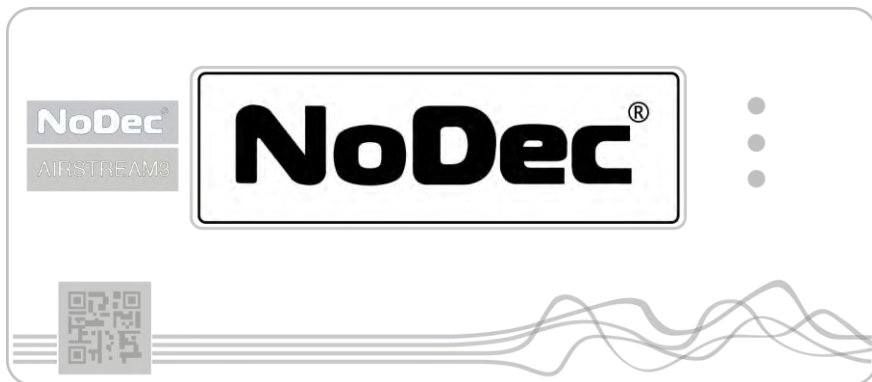

Chargement


Le système commence automatiquement à gonfler le matelas et l'écran affiche 8 cellules qui se gonflent simultanément tandis que le message « Attendre » clignote. Un voyant orange s'allume en continu jusqu'à ce que le matelas soit prêt à être utilisé.

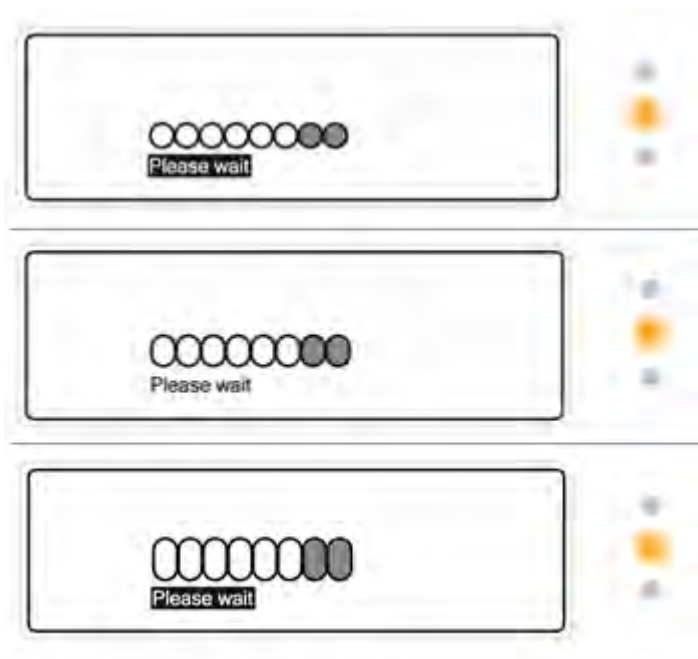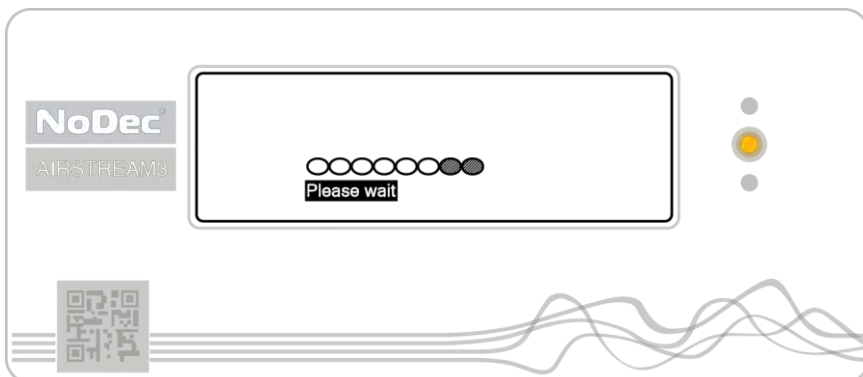

N.B. Pendant cette phase de gonflage, il n'est pas possible de modifier les réglages.

Mode alterné automatique



Une fois que le matelas est gonflé, le système passe automatiquement en mode alterné et se calibre sur le poids du patient. L'écran suivant s'affiche et le voyant devient vert.

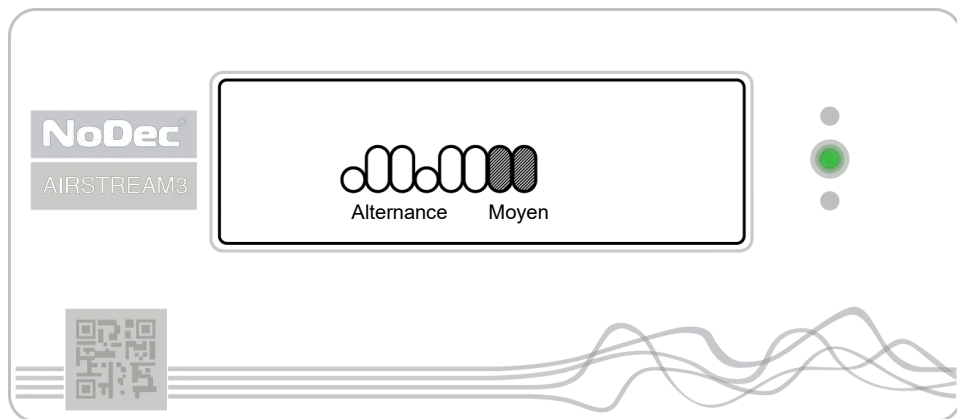

Déverrouillage


Pour modifier le mode ou les réglages, vous devez d'abord déverrouiller l'écran d'affichage. Appuyez sur l'écran tactile jusqu'à ce qu'un cadenas s'affiche. Pour déverrouiller l'écran tactile, appuyez sur l'écran jusqu'à ce que le cadenas s'ouvre complètement et que le menu Réglages utilisateur s'affiche.

Déverrouillage de l'écran

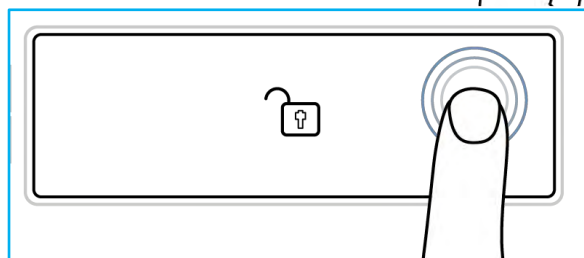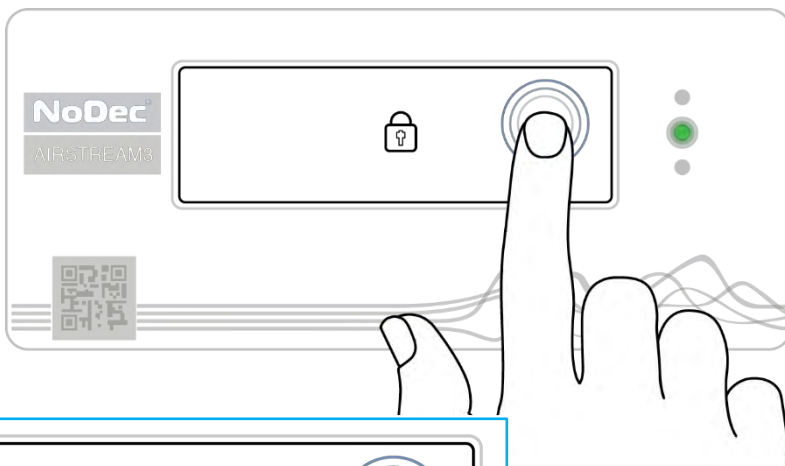

Appuyez légèrement sur l'écran jusqu'à ce que le cadenas s'ouvre.

Enlevez votre doigt et le menu suivant s'affiche :

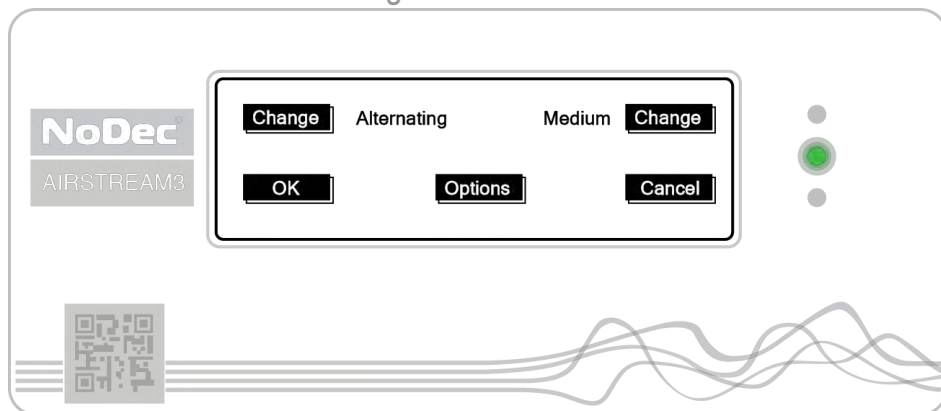

Après 20 secondes d'inactivité, le système verrouille automatiquement l'écran tactile.


Réglages utilisateur

Le NoDec® BARI dispose de 3 modes différents, dont certains proposent des options supplémentaires de réglage de la pression :


- **Mode alterné**
 - *Souple*
 - *Mi-ferme*
 - *Ferme*
- **Mode statique**
 - *Souple*
 - *Mi-ferme*
 - *Ferme*

- **Gonflage maximum**

Faites défiler les options en appuyant sur les différents boutons « Changer » qui s'affichent à l'écran, jusqu'à ce que vous trouviez le mode désiré. Appuyez sur le bouton « OK » pour confirmer la sélection.




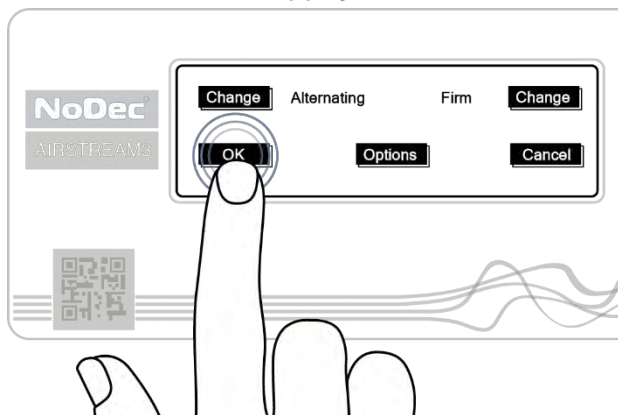


N.B. : Pour revenir au fonctionnement normal sans effectuer de modifications, appuyez sur le bouton.

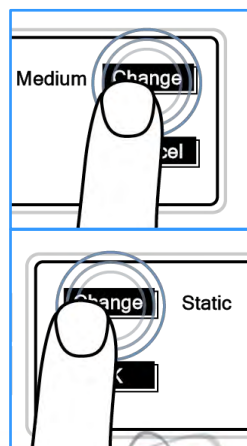

Mode alterné

Au démarrage, le système se met par défaut en Mode alterné et se calibre automatiquement en fonction du poids et de la position du patient.

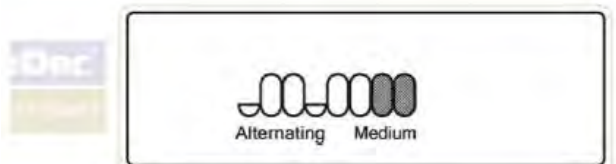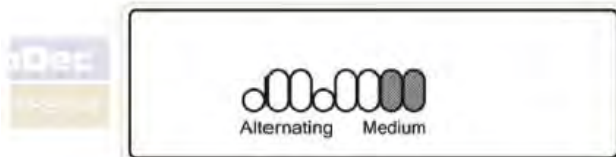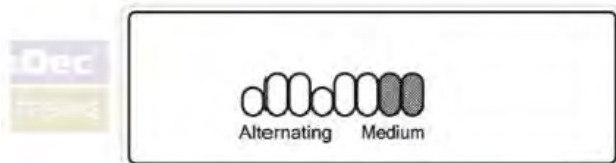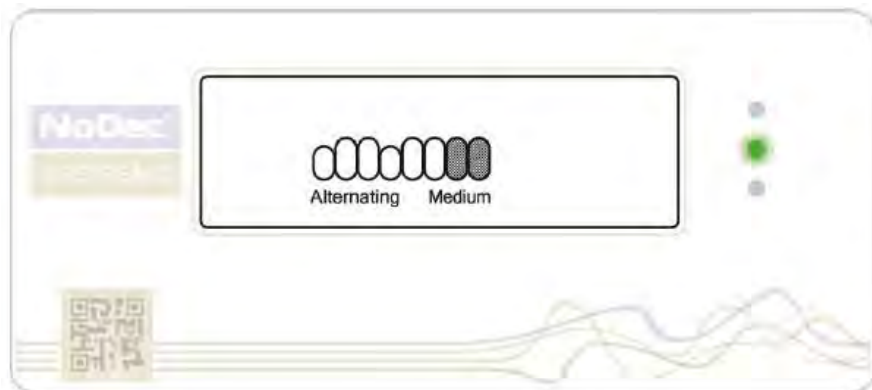


Alors que l'unité de contrôle dégonfle les cellules, l'Écran d'affichage montre le mouvement du matelas en temps réel

En Mode alterné, une cellule d'air sur trois se gonfle et se dégonfle, avec une durée de cycle de 7 minutes 30 ou 15 minutes selon les préférences régionales.

Lorsque l'air des cellules « A » est aspiré, les parties du corps qui étaient initialement en contact avec ces cellules ne subissent plus aucune pression.


Après 2 minutes 30 (ou 5 minutes, selon la durée du cycle), les cellules « A » se regonflent et les cellules « B » se dégonflent pendant les 2 minutes 30 suivantes. Cette séquence est ensuite répétée pour les cellules « C ».

Au cours du cycle de 7 minutes 30 (ou 15 minutes), la pression de contact est complètement éliminée de manière régulière de toutes les parties du corps en contact avec les composants actifs du matelas.

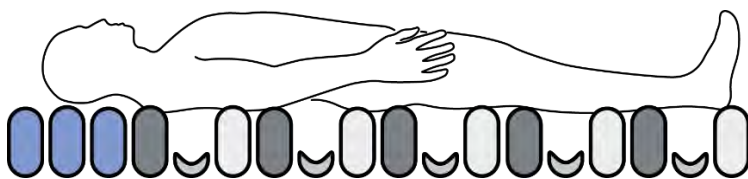

Mode statique

Dans ce mode, toutes les cellules sont gonflées, le matelas se calibre sur le poids du patient et reste ensuite en mode statique. Après une période prédéfinie de 30 minutes, le mode repasse en Mode alterné. Cette mesure est nécessaire pour la sécurité des patients et pour réduire les problèmes potentiels d'escarres.

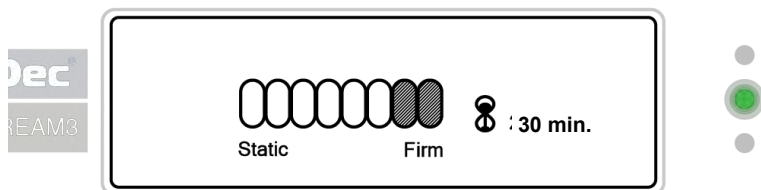


N.B. Selon les préférences régionales, cette durée peut être réglée sur 30 minutes, 2 heures ou illimitée.



Le mode statique peut être utile pour examiner un patient dont les escarres ont cicatrisé. Il n'est pas nécessaire de placer le patient sur un autre matelas pour l'examen. Si les escarres de décubitus devaient réapparaître, les soins appropriés peuvent être repris et le système peut être réglé sur le mode de pression alternée. Le Mode statique est également souvent utilisé pour faciliter les soins, comme la toilette du patient ou la kinésithérapie.

Modification des réglages de pression







Les changements de réglages de pression (Souple, Mi-ferme et Ferme) s'effectuent très facilement. La pression programmée est affichée sous les « cellules de tête ».

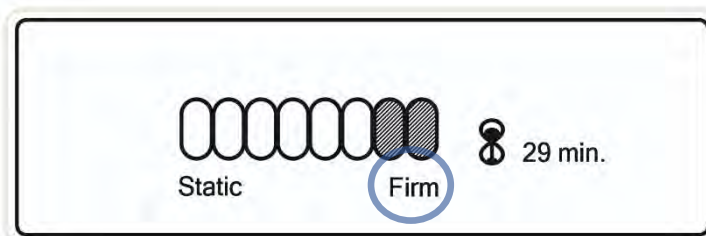

Les différences de tailles des cellules en fonction des modes de pression sont également très nettes.

STATIQUE



ALTERNÉ

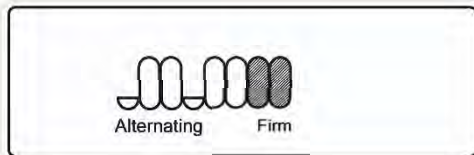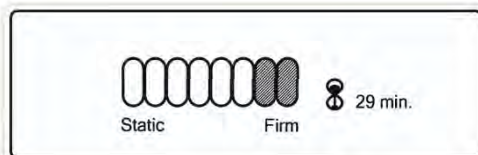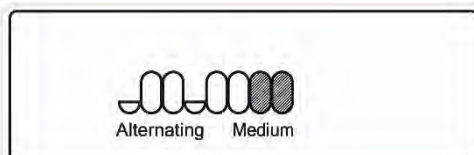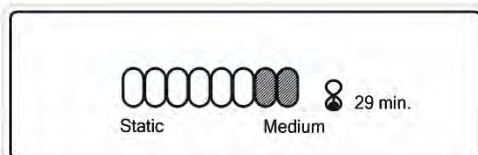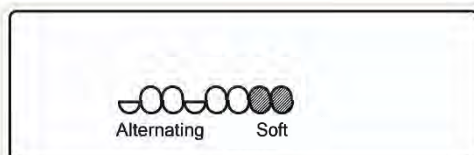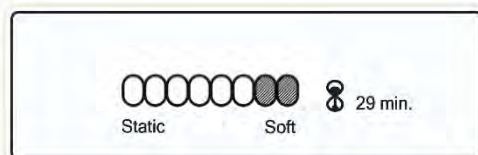

Les pressions « Souple » et « Mi-ferme » sont plus adaptées aux patients de petite taille et de faible poids. La pression « Souple » convient uniquement aux patients pesant 60 kg ou moins.

Mode gonflage maximum

Lorsqu'il est en pression « **Extra ferme** », le matelas est gonflé au maximum de manière à reproduire un matelas d'hôpital ordinaire. Ce mode est utile pour examiner un patient dont les escarres ont cicatrisé. Le patient n'a pas besoin d'être déplacé sur un autre matelas pour être examiné. Si les escarres réapparaissent, le traitement doit reprendre et la pompe doit être réglée sur le Mode alterné.

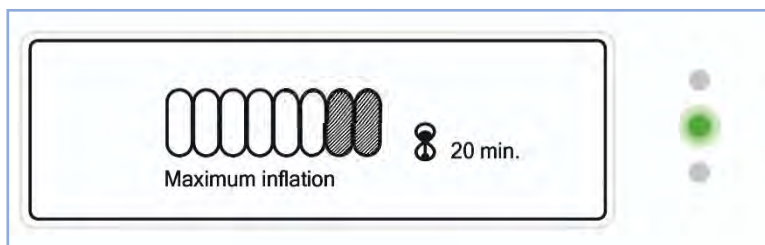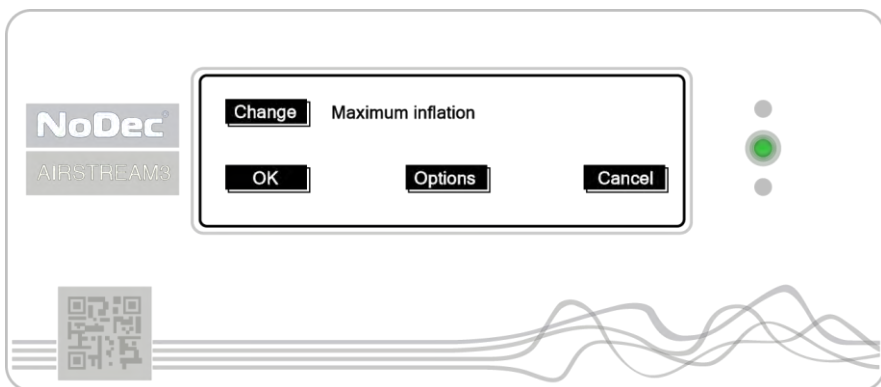


N.B. Par souci de protection du patient, ce mode a une durée prédéfinie de 20 minutes.


Structure du matelas

Le matelas NoDec® BARI est composé de 26 cellules d'air individuelles et de deux renforts latéraux internes. Deux rallonges en mousse ont également été ajoutées, lesquelles peuvent être utilisées avec les lits bariatriques à rallonge. La taille du matelas de 90 cm peut être élargie à 100 cm et 120 cm grâce à l'utilisation de boudins de mousse. Ces boudins peuvent être enlevés ou insérés en fonction des besoins.

Profil latéral du matelas

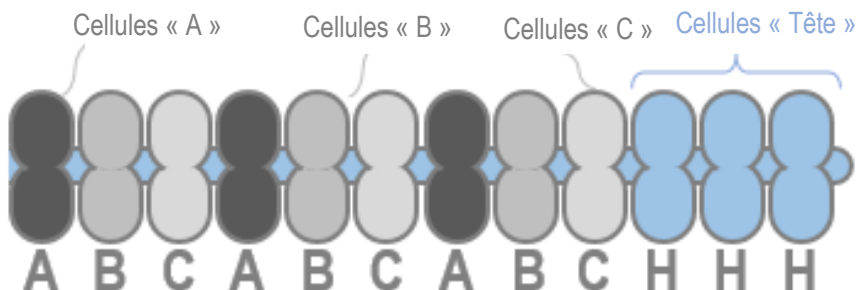

Vue du pied du matelas

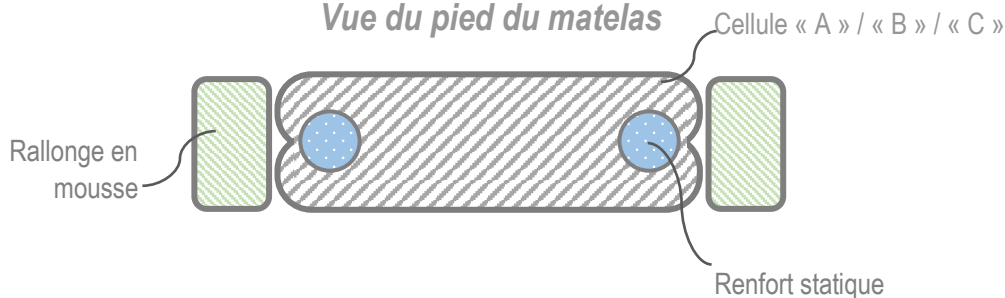


Fonction de descente du patient


Le matelas est doté d'une fonction spéciale qui aide les patients obèses à descendre du lit en dégonflant la partie centrale.

En suivant la flèche « Dégonflage » sur la housse du matelas, l'aidant doit d'abord retirer toutes les rallonges en mousse.

- Réglez la pompe en **Mode Statique** (page 26)
- Faites asseoir le patient sur le côté du matelas où figure la flèche « Sortie ».
- Placez-vous du côté « Dégonflage » et ouvrez la housse inférieure au niveau de la tête du matelas. Vous verrez alors trois robinets.
- Tournez chaque robinet de la manière suivante :

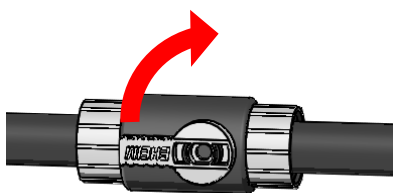

- Au pied du matelas, déclipsez les trois valves visibles de la manière suivante :

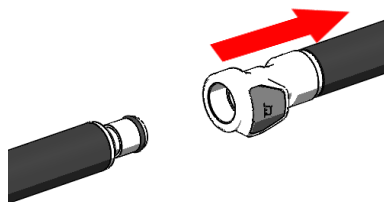

- La partie centrale se dégonfle et le patient peut facilement sortir du lit.




Assurez-vous de regonfler le matelas à son niveau initial avant de prodiguer des soins au patient, en effectuant les étapes en sens inverse.

Alarmes

Chacun des voyants d'alarme suivants est accompagné d'une alarme sonore à tonalité fixe. L'alarme sonore peut être annulée en appuyant sur le bouton « *Annuler l'alarme sonore* ».

Toutefois, si la cause de l'alarme n'est pas résolue au bout de 15 minutes, l'alarme sonore se déclenche à nouveau.

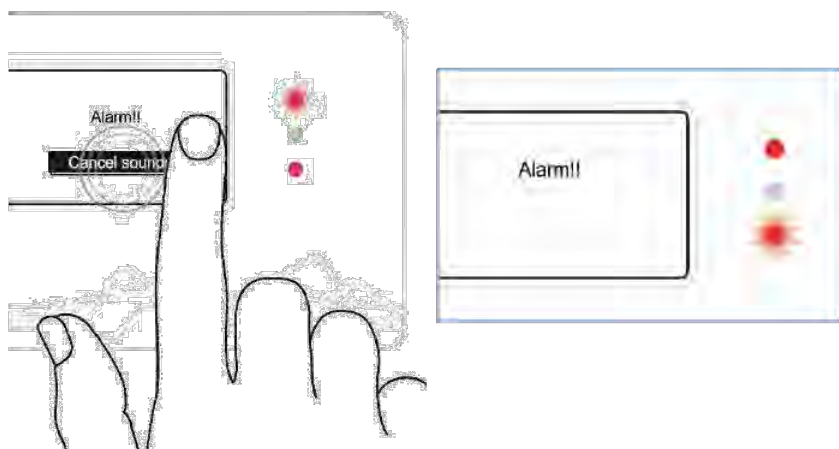


Pour désactiver l'alarme de façon permanente ou réinitialiser la pompe après avoir résolu le problème à l'origine de l'alarme, il suffit d'éteindre la pompe et de la rallumer.

TOUTES LES CONDITIONS D'ALARME SONT SIGNALÉES PAR DES **VOYANTS ROUGES CLIGNOTANTS** EN ALTERNANCE.

Alarme de pression élevée


Cette condition peut être causée par une surpression dans le matelas, par exemple lorsqu'une autre personne s'assoit sur le matelas. Cette alarme est indiquée de la manière suivante et accompagnée de **deux voyants qui clignotent en ROUGE**.

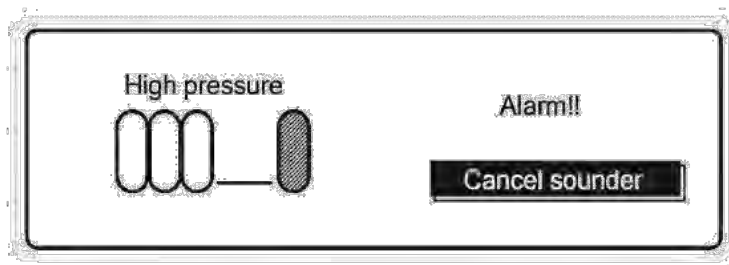

Pour résoudre ce problème, appuyez doucement sur le bouton RCP et laissez échapper une petite quantité d'air, puis rebranchez l'extrémité du tuyau. Puis, redémarrez la pompe. Des alarmes récurrentes de pression élevée peuvent indiquer un défaut interne. Si cela se produit, le matelas ne doit plus être utilisé. La pompe doit être envoyée pour réparation sans délai.


Alarme de pression basse

Cette condition peut être déclenchée par l'ouverture de la valve RCP ou par une fuite dans le matelas. Cette alarme est indiquée de la manière suivante et accompagnée de **deux voyants qui clignotent en ROUGE**.

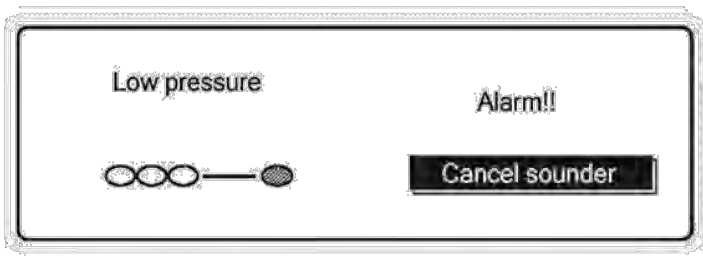

Alarme de panne de courant

En cas de panne de courant ou de débranchement accidentel de l'appareil, l'écran suivant s'affiche, accompagné de **deux voyants qui clignotent en ROUGE**.

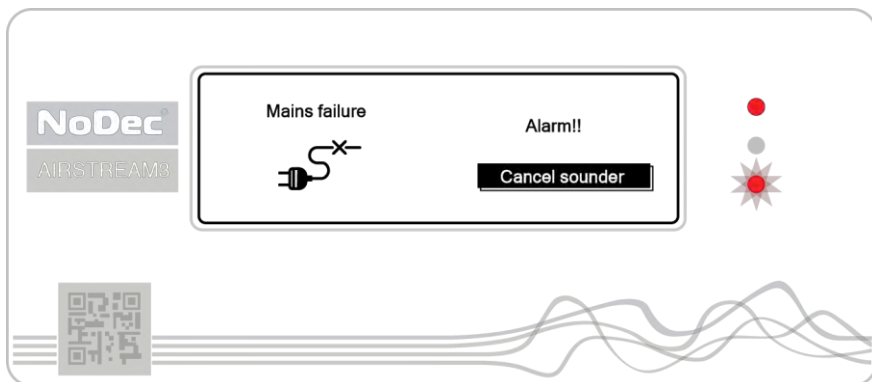


Vous pouvez arrêter cette alarme en rebranchant le câble d'alimentation sur le secteur, sans qu'il soit nécessaire de redémarrer la pompe. Toutefois, cela dépend de la région où vous vous trouvez.

N.B. L'alarme de panne de courant est alimentée par une petite pile. *L'unique fonction de cette pile est de faire fonctionner l'alarme en cas de coupure de courant.*

RCP d'urgence

Si le patient doit subir une réanimation cardiopulmonaire, le NoDec® BARI est équipé d'un module RCP qui dégonfle rapidement le matelas afin que la réanimation cardiaque puisse être pratiquée sur une surface ferme.

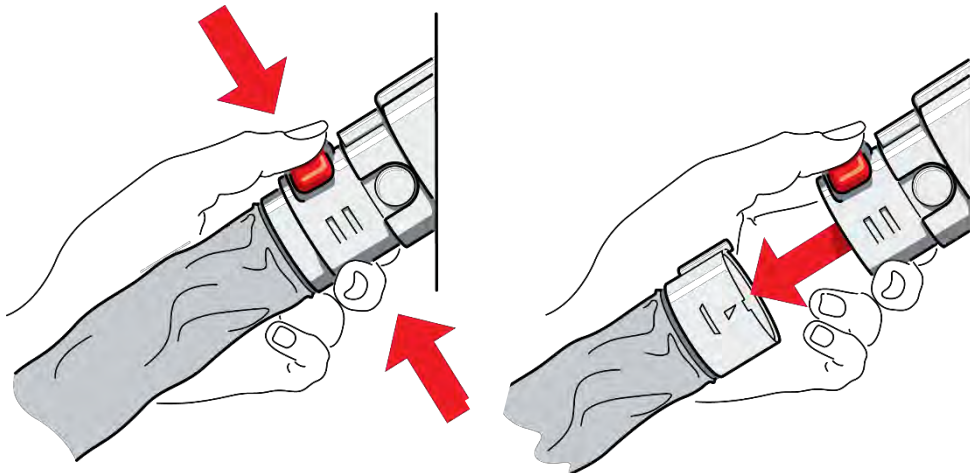

Pour déclencher ce système d'urgence, il suffit de saisir le module RCP et d'appuyer sur le BOUTON ROUGE. L'extrémité du tuyau la plus proche du matelas doit se détacher et le matelas se dégonfle rapidement.





Une fois que le module RCP a été débranché et que la réanimation est terminée, assurez-vous que l'extrémité du tuyau est remise en place correctement. Le bouton rouge émet un clic audible, puis la pompe redémarre.

Mode de transport

Cette configuration permet de déplacer facilement le matelas dans l'hôpital.

Préparation

Sélectionnez le mode STATIQUE avant de séparer la pompe du matelas. Lorsque toutes les cellules sont gonflées, ÉTEIGNEZ la pompe et débranchez le tuyau.

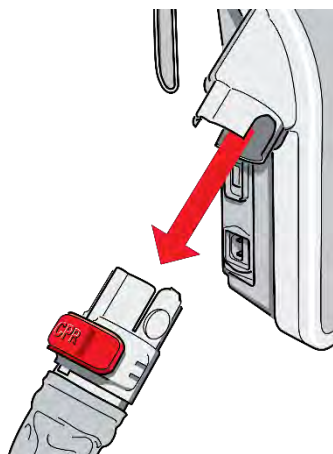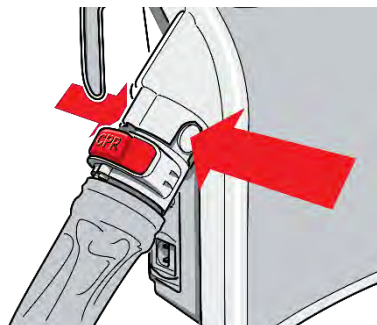

Il suffit d'appuyer sur les boutons qui se trouvent de chaque côté du raccord pour le débrancher. Le matelas restera gonflé pendant plusieurs heures.

Stockage (et expédition)



La pompe doit être stockée debout, à la verticale, et NON à plat. Les conditions suivantes doivent s'appliquer, dans la mesure du possible, afin d'assurer une durée de vie optimale des composants internes :

Température ambiante	+10 °C – +30 °C
Humidité relative	10 % – 100 % sans condensation
Pression atmosphérique	700 hPa – 1 060 hPa

Options d'écran supplémentaires

Écran du menu des options


Pour accéder au menu des options, il suffit de déverrouiller l'écran et d'appuyer sur « Options ». Le menu suivant s'affiche.

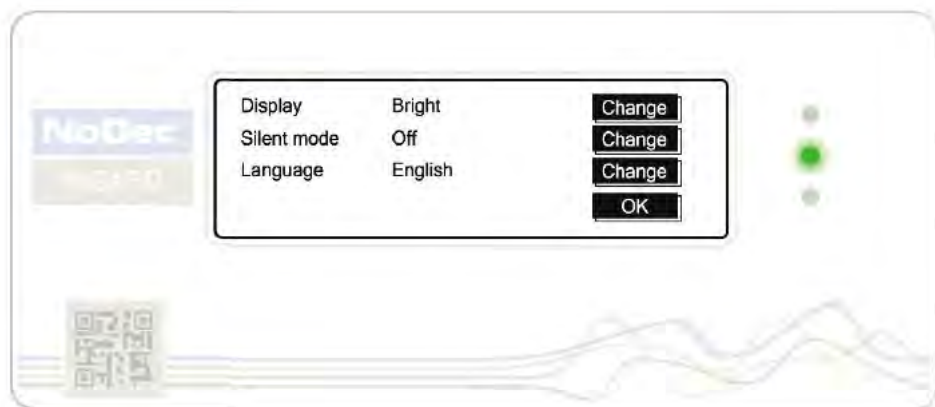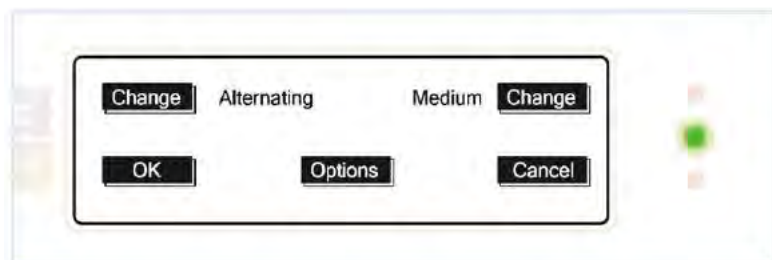

Ici, vous pouvez diminuer la luminosité de l'affichage et activer le mode silencieux, deux options qui peuvent s'avérer utiles pendant la nuit dans un service hospitalier.

Luminosité de l'écran

Appuyez sur « Changer », comme indiqué ci-dessous, pour diminuer ou augmenter la luminosité de l'écran.

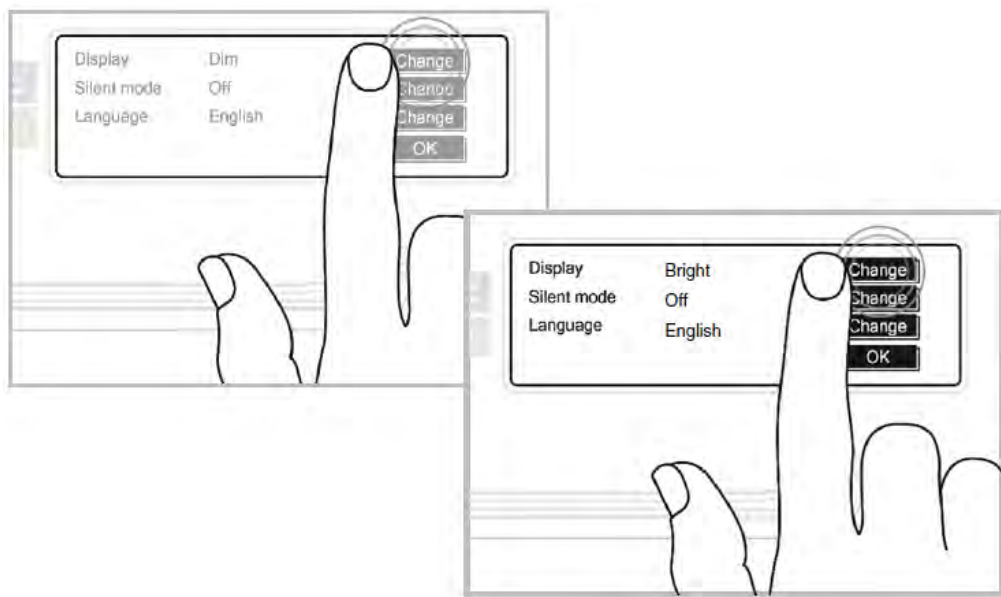

Mode silencieux


Appuyez sur « Changer » pour activer ou désactiver le mode silencieux. L'écran n'émet pas de son lorsque vous le touchez.




Même lorsque le mode silencieux est sélectionné, un avertissement sonore se déclenche en cas d'alarme.

Modification de la langue

Appuyez plusieurs fois sur la touche « Changer » pour faire défiler les langues présélectionnées en fonction des régions géographiques. Si vous ne trouvez pas la langue souhaitée, veuillez contacter votre distributeur.

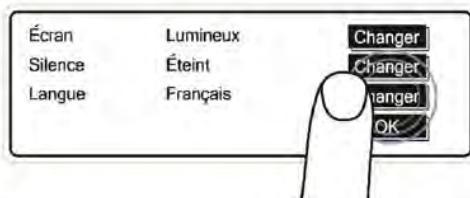

Après avoir sélectionné tous les réglages nécessaires, appuyez sur « OK » pour vous assurer que tous les changements ont bien été effectués.

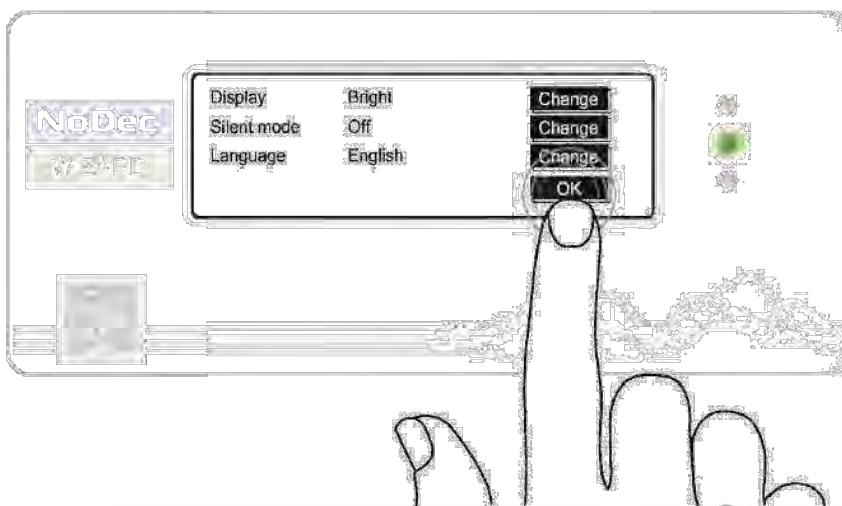


Nettoyage et entretien

Procédures de nettoyage

Il est recommandé de nettoyer le matelas toutes les semaines, ou plus tôt s'il est très sale. Veillez à vous laver les mains et à porter des vêtements de protection appropriés avant de commencer les opérations de nettoyage.

Nettoyage du matelas

1. *Laissez la housse sur le matelas et débranchez le matelas de la pompe.*
2. *Nettoyez la surface de la table de lavage avec une solution d'hypochlorite ou un désinfectant équivalent.*
3. *Lavez la housse supérieure du matelas avec de l'eau chaude (60 °C) et du détergent. Séchez-la avec du papier absorbant.*
4. *Pliez le matelas sur lui-même, puis nettoyez la table et la partie exposée du matelas.*

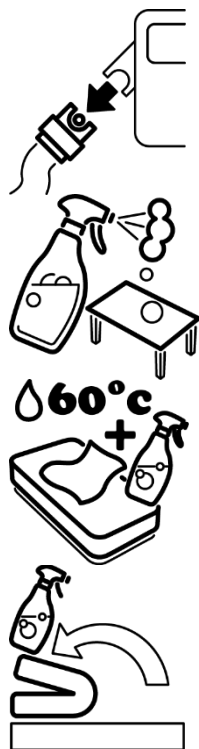




5. *Retournez le matelas de manière à ce que l'autre moitié inférieure soit exposée et nettoyez à la fois le matelas et la table.*

6. *Répétez les étapes 3 à 5 avec une solution d'hypochlorite ou un désinfectant équivalent.*

7. *Essuyez le tuyau ombilical avec de l'eau chaude et du détergent. Séchez-le avec du papier absorbant et nettoyez-le à nouveau avec de l'hypochlorite ou une solution équivalente.*

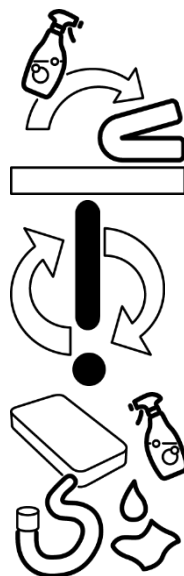

*Si nécessaire, la housse peut être retirée et lavée en machine à **80-90 °C pendant au moins 10 minutes.***

Pour une désinfection générale, utilisez une solution d'hypochlorite (ou similaire) de 1 000 ppm. Lorsque les housses sont contaminées par des matières organiques, utilisez une solution de 10 000 ppm.

La housse peut également être stérilisée à l'oxyde d'éthylène ou en utilisant le processus de Draeger.

Nettoyage de la pompe

La pompe peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution désinfectante ou stérilisée à l'oxyde d'éthylène ou en utilisant le processus de Draeger.



Assurez-vous que l'appareil est débranché du secteur avant de le nettoyer.

NE stérilisez PAS le matelas ou la pompe à l'autoclave.

Entretien



Seuls des techniciens qualifiés, formés ou officiellement approuvés par Rober Limited, peuvent effectuer l'entretien, les modifications ou les réparations du système de matelas.



AUCUNE opération de maintenance ou d'entretien ne doit être effectuée lorsque le système de matelas est en cours d'utilisation. Assurez-vous que le patient ne se trouve pas à proximité du système lorsque vous effectuez des opérations d'entretien.

Paramètres techniques

Pompe

Modèle	NoDec® BARI
Dimensions (L x l x h)	350 x 180 x 380 mm
Poids	6,8 kg
Alimentation électrique	230 V~ ±10 %, 50 / 60 Hz
Consommation électrique	40 W max.
Courant	0,35 A
Indice IP	IP42
Classification	Dispositif médical de classe B Protection de classe II (certifié conforme à la classe I).
Fusibles	2 x T 1,6 A ; 250 V~ 5 x 20 mm
Cycle de fonctionnement	Continu
Indice d'inflammabilité	UL 94 V-0
Température ambiante	+10 °C à +30 °C
Humidité relative	30 % – 75 % sans condensation
Pression atmosphérique	700 hPa – 1 060 hPa

Matelas

Modèle	NoDec® BARI
Dimensions (L x l x h)	2 000 x 900 x 200 mm (<i>taille standard</i>) 2 000 x 1 000 x 200 mm (<i>boudin de mousse incl.</i>) 2 000 x 1 200 x 200 mm (<i>boudin de mousse incl.</i>)
Nombre de cellules	27
Poids	11 kg
Matériau du matelas	Polyuréthane
Matériau de la housse	Dartex / Nylon enduit de PVC
Indice d'inflammabilité	Conforme à la norme BS7175 source d'inflammation 0, 1 et 5
Poids maximal du patient	400 kg

REMARQUES



REMARQUES



REMARQUES



Votre distributeur local :



Fabricant agréé

Rober Limited, Wheatbridge Road, Chesterfield, Derbyshire. Royaume-Uni S40 2AB

Tél. : +44(0)1246 245404 www.roberlimited.com



EC

REP

Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr, Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malte.